



ARKONA

# ETCHMASTER

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОТРАВОЧНЫЙ ГЕЛЬ  
ОРТОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА 36%

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

В набор входит шприц, наполненный  $\pm 2,6$  г (2 мл),  $\pm 6,5$  г (5 мл),  $\pm 13$  г (10 мл) или  $\pm 60$  г (50 мл) препарата гелеобразной консистенции (действующим веществом является 36% ортофосфорная кислота) + наконечники ETCHMASTER TIPS.

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Протравливание эмали зубов для улучшения адгезии композитных стоматологических пломб и реставраций. Предотвращает образование краевой щели в области композитной реставрации.

## ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ

- пломбировке композитами химического и светового отверждения,
- герметизации фиссур,
- протравливании эмали опорных зубов перед началом фиксации постоянных ортодонтических аппаратов.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

На тщательно очищенную и высушенную поверхность эмали наложить тонкий слой геля ETCHMASTER. Оставить на около 30 секунд. Промыть сильной струёй воды. Тщательно высушить до обретения эмалью матово-белого цвета, но не пересушивать эмаль зуба.

Не протравливать дольше 60 с.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во время протравливания рекомендуется использовать защитные очки для пациента и медперсонала.

Избегать попадания препарата в глаза и на мягкие ткани ротовой полости, а также кожу лица и рук медперсонала и пациента.

В случае контакта смыть большим количеством воды.

В случае попадания в глаза обратиться к специалисту.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре 3-28°C. Беречь от детей.

## ГАРАНТИЯ

Фирма ARKONA обменивает некачественные стоматологические материалы, приобретённые покупателем или возвращает ему их стоимость. ARKONA не отвечает за ущерб, вызванный неправильным хранением или не соответствующим инструкции применением препарата.

Инструкция действительна с 29.02.2021



**ARKONA**

ARKONA Laboratorium Farmakologii  
Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk,  
Nasutow 99C, 21-025 Niemce, Poland  
[www.arkonadent.ru](http://www.arkonadent.ru)

## Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «АРКОМ», 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 64, лит. А, пом. 14Н  
Тел. 8 800 700-25-25, [www.arkom-org.com](http://www.arkom-org.com)